

Приложение Sleepase

Трекер сна Sleepdot работает совместно с приложением Sleepase. Sleepase владеет международной ведущей технологией мониторинга сна. Благодаря этому точно измеряется частота сердечных сокращений, частота дыхания, переворачивание, движения тела и соотношение легкого, среднего и глубокого сна. Приложение автоматически генерирует ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты сна, которые могут быть легко восстановлены в любое время.

Для работы приложения необходимо: Bluetooth 4.0 и операционная система не ниже IOS 7.1 или Android 4.3

Приложение Sleepase можно загрузить двумя способами:

Отсканировать QR-код:




Найти и загрузить приложение в магазине:




Приложение Sleepase

Загрузите и установите приложение

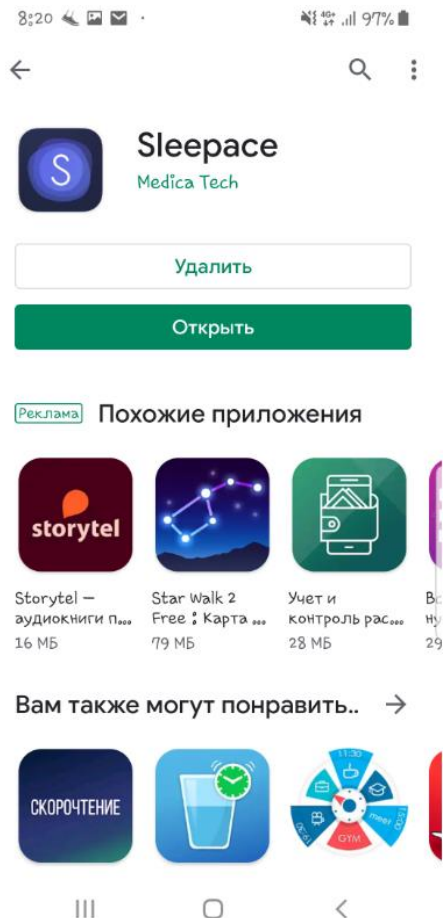

Откройте приложение и зарегистрируйтесь

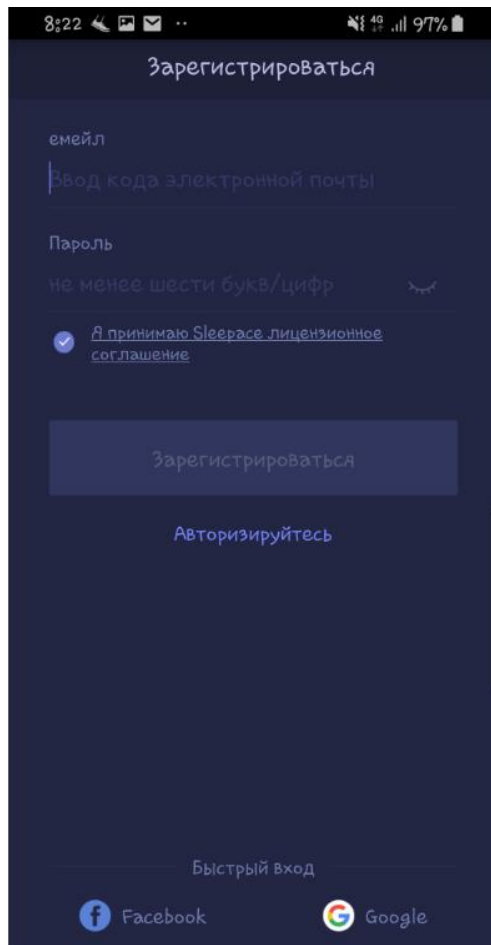


Нажмите «Я хочу добавить устройство»



Приложение Sleepase


Выберите устройство
Sleep Dot

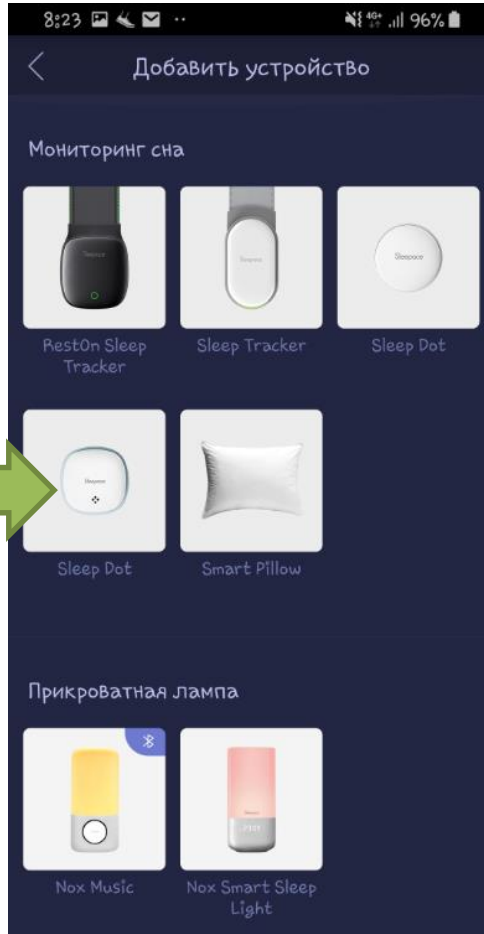

Вставьте в Sleep Dot
батарею






Выберите устройство из
списка, номер устройства
указан на коробке.

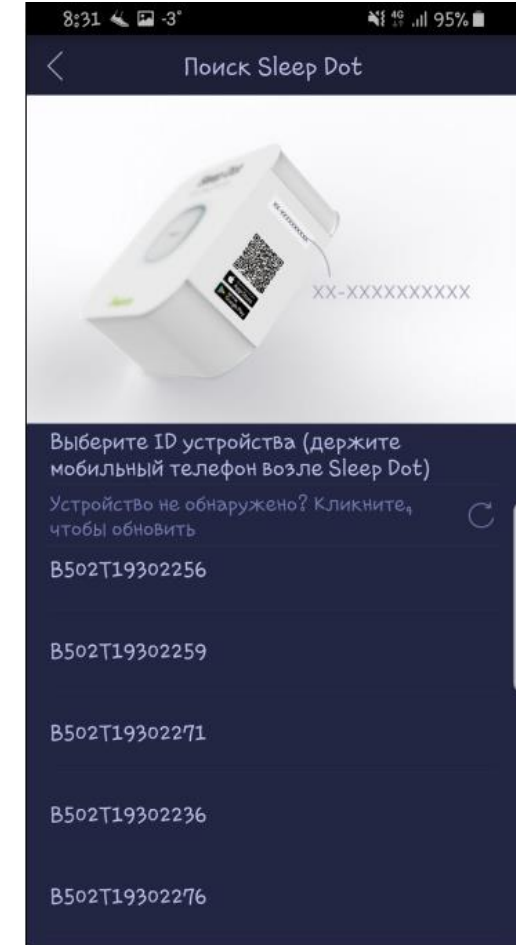

Приложение Sleepase

Устройство добавлено

Настройте умный режим для автоматического включения/выключения музыки, будильника

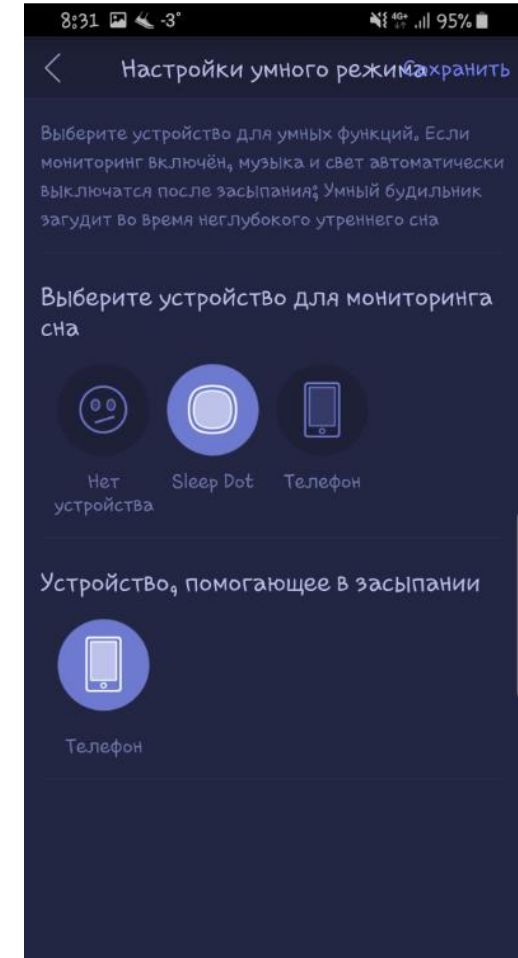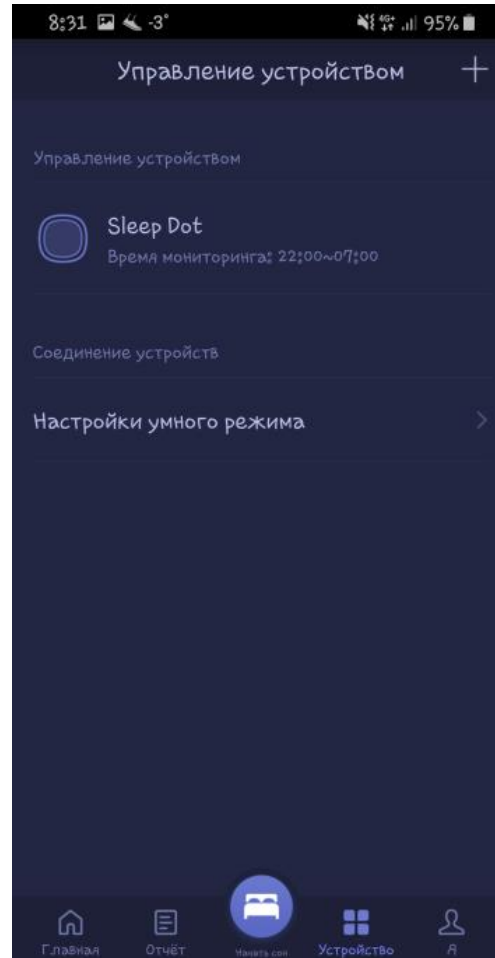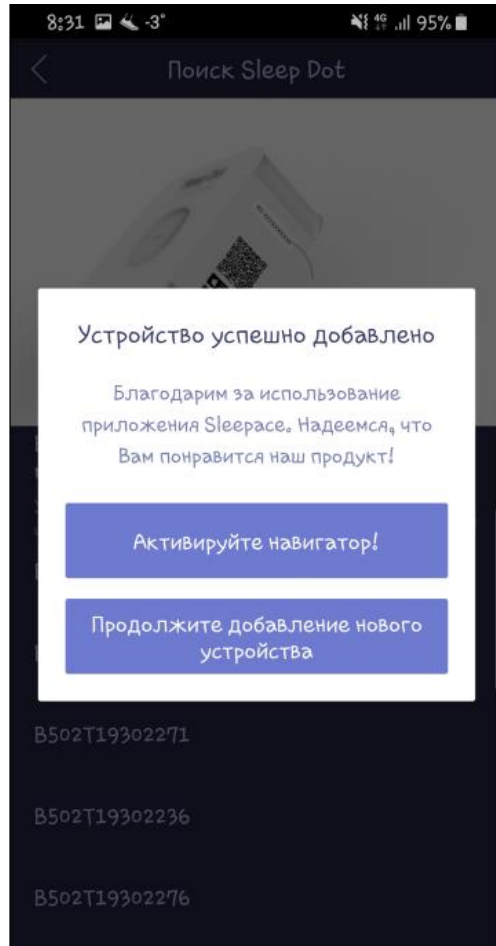

Приложение Sleepace


Выберите время мониторинга



Установите будильник





Выберите пробуждающую мелодию

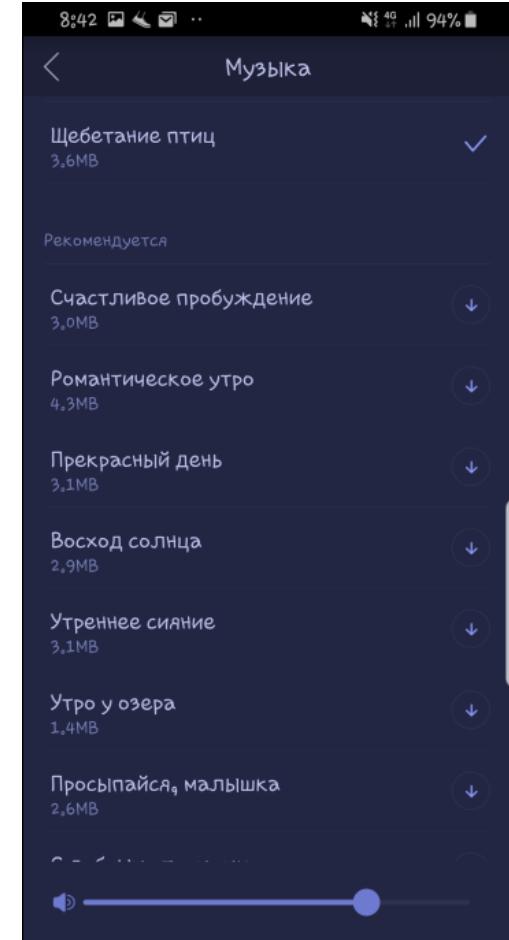

Приложение Sleepase

Получайте данные о
Вашем сне

Анализируйте графики

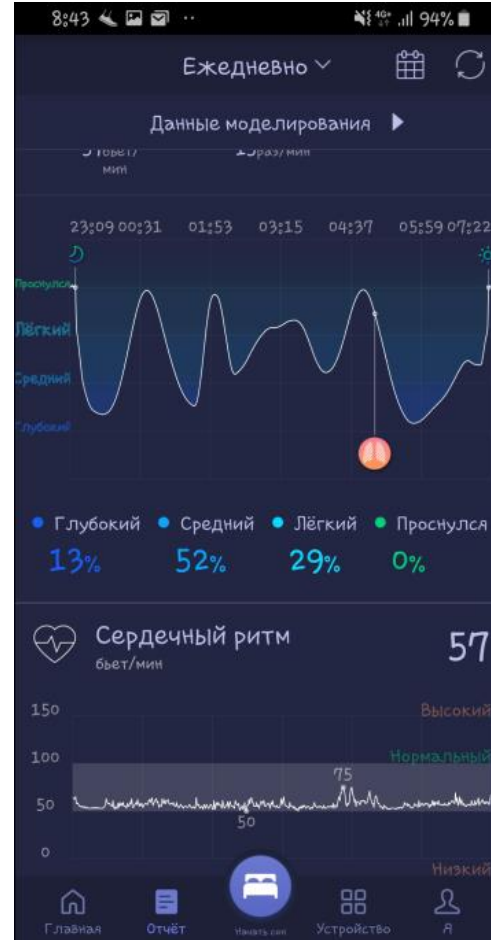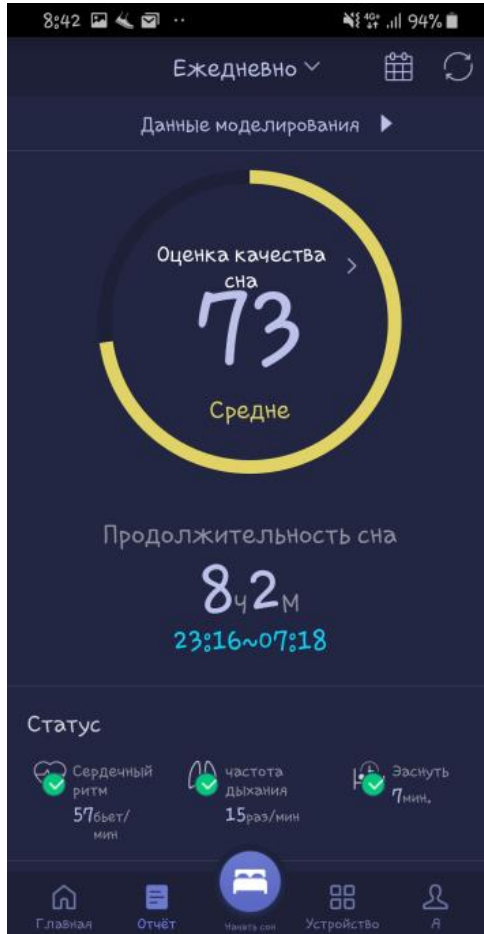

Улучшайте
качество Вашего
сна и жизни!

А трекер сна Sleep
Dot в этом поможет!