



askona

Территория здорового сна



SMART DNA

smartdna.ru

Москва, ул. Льва Толстого, д.23 к.3, офис 233

+7 (495) 899 00 31

+7 (916) 949 52 52

ГЕНЕТИКА СНА

ВОЗЬМИТЕ ОБРАЗЕЦ УТРОМ, СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ.

За 2 часа до сбора образца не стоит есть,
чистить зубы и употреблять жевательную резинку.

Вымойте руки. Вскройте пробирку.
Не прикасаясь к аппликатору и вате,
достаньте палочку для сбора материала,
удерживая пробирку за крышку.

Потрите 15-20 раз ватной частью между
десной и щекой, медленно проворачивая
тампон для равномерного распределе-
ния биоматериала..

Аккуратно поместите тампон
в пробирку, но не закрывайте ее.

**СТАРАЙТЕСЬ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ
СМАЧИВАТЬ ТАМПОН СЛЮНОЙ.
ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ
- ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ, А НЕ СЛЮНА.**


1



2



3

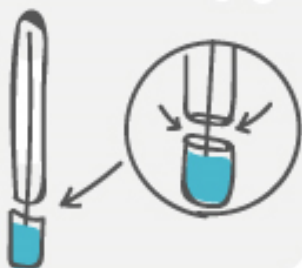


4



Приоткрытую пробирку положите на чистую и сухую поверхность, дав тампону просохнуть в течение 40-60 минут, затем плотно закройте пробирку.

5

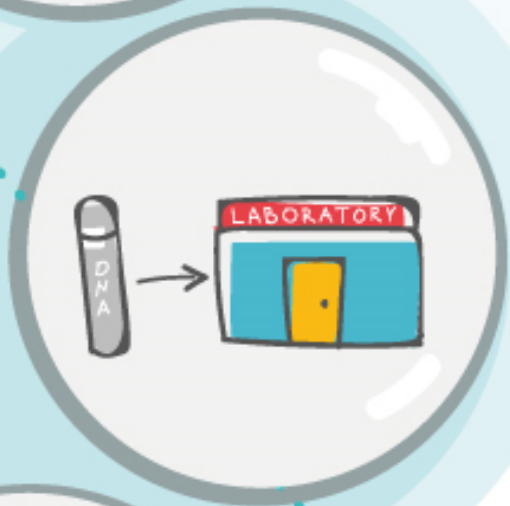

Поместите образец в конверт и передайте в лабораторию не позднее, чем через 7 дней после сбора материала.

6



Войдите в личный кабинет на сайте www.smartdna.ru с помощью уникального id номера и в течение двух недель получите отчет с результатами.

**ВЫ МОЖЕТЕ СОБРАТЬ МАТЕРИАЛ
В ЛЮБОМ УДОБНОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.**